

2、解除呼叫：

分机或手持呼叫器如已呼出，若需解除呼叫，只需再次按下“呼叫/解除”键。

3、护理增援：

分机液晶屏上有“增援”选项，对应按下右侧按键，主机上相应的路选分机键呈红色闪亮，并显示“请求增援”语音播报“XX号房 XX号床 请求增援”，同时该病房门外的门灯亮，以提示需要增援；并显示“请求增援”；如需对讲，可点击主机上的相应路选分机键与之对讲（按下TALK键可讲话，松开TALK键可听分机讲话）。

4、收看电视：

按下手持上的“电视”按钮，可打开电视机。按上下调频按钮“∧ 、 ∨ ”可进行调频；按音量调节按钮“+、-”，可调节音量大小。如按下手持上的“收音机”按钮，可打开电台广播，调频方式相同。

5、呼叫护工：


按手持上的“0+返回”键（间隔时间在两秒以内有效）可呼叫护工。护工随身配带的无线手表接收机会实时接收病人的呼叫信息；再按一下取消呼叫。


6、灯光控制：

按下手持上的“灯光控制”按钮“开、关”，可控制床头灯的开和关。

病床分机

产品安装使用说明

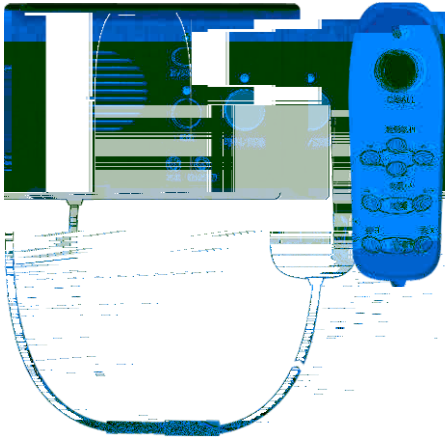

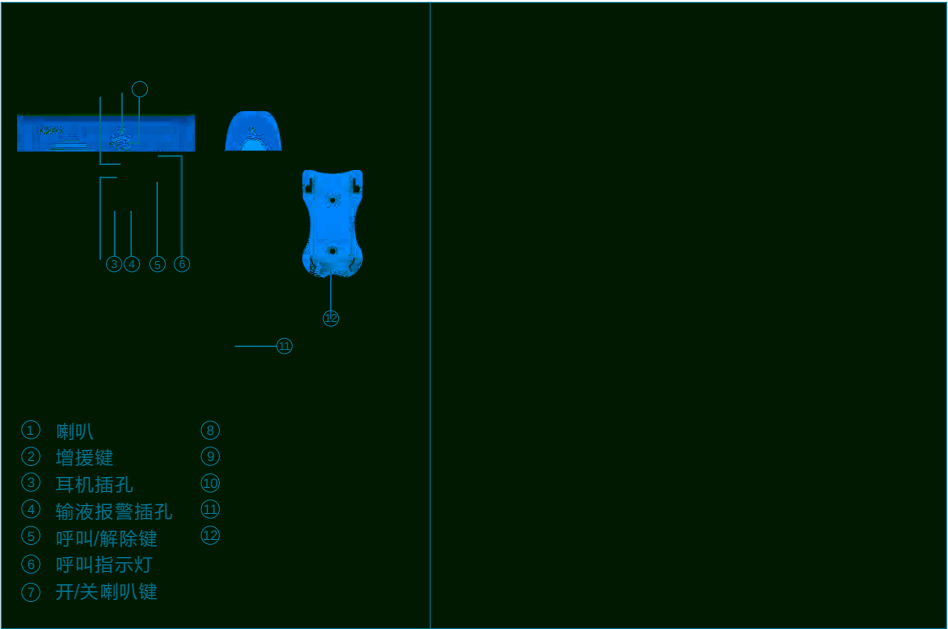

一、背面接口说明：

四、使用说明：