

分机或手持呼叫器如已呼出，若需解除呼叫，只需再次按下“呼叫/解除”键。

3、护理增援：


分机液晶屏上有“请求增援”选项，对应按下方按键，主机上相应的路选分机键呈黄色闪亮，按键上显示“请求增援”，并语音播报“XX号房 XX号床 请求增援”，同时该病房门外的门灯亮，以提示需要增援；并在主机上显示“请求增援”；如需对讲，可点击主机上的相应路选分机键与之对讲。


4、查看信息：

分机液晶屏上有“治疗信息、费用信息、设备信息”三个查看信息选项，按下对应的查看信息键，可进入查看界面进行查看。


病床分机

产品安装使用说明

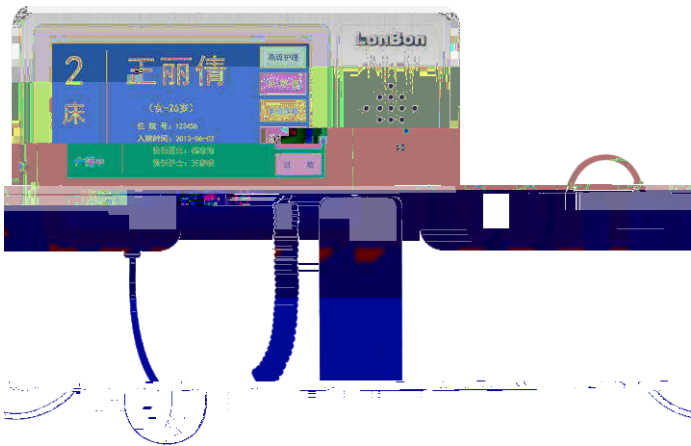

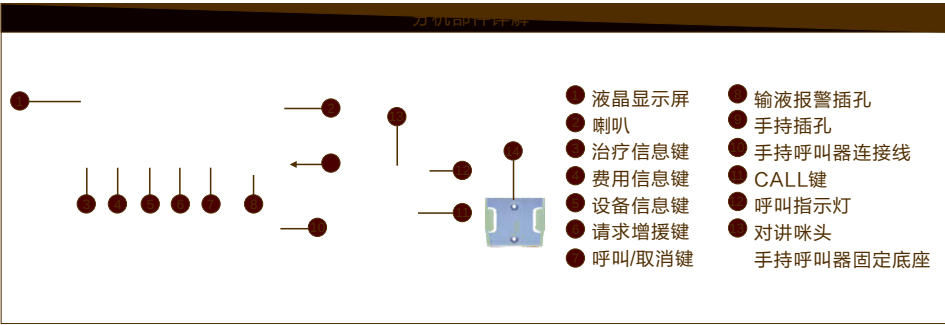

一、背面接口说明：

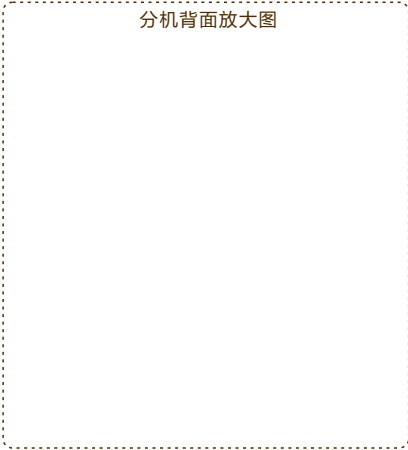

二、安装底盒预装墙面示意图：

三、基本设置：